



- 1. AMAÇ :** . Bu talimatı amacı eritrositlerdeki antijenlere karşı, vücudun kendi oluşturduğu antikorları saptamaktır.
- 2. KAPSAM:** Bu talimat doğru direkt coombs tespitini kapsar.
- 3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar çalışanları sorumludur.

#### **4.TALİMAT AKIŞI:**

**ÜRÜN:** ABO/Rh FOR NEWBORNS

**ORİJİN:** Human

**PROFİL:** A-B-AB-D-Ctl / AHG

**KAT. NO:** 001017

#### **1.NUMUNENİN HAZIRLANMASI**

ID-Dilüent 2 ile %0,8'lik eritrosit süspansiyonu hazırlanır. (1 ml ID-Dilüent 2 "iki basım" + 10 µL sediment)

#### **2.NUMUNENİN DAĞITILMASI**

Yeni doğan kan grubu kartının son mikrotüpüne 50 µL %0,8'lik eritrosit süspansiyonu pipetlenir.

#### **5. ID-SANTRİFÜJ**

10 dakika santrifüj edilir

#### **DEĞERLENDİRME**

Test negatif ise mikrotüpte (DAT) dipte sediment dipte birikir

Test pozitif ise kan örneği pozitiflik derecesine göre sınıflandırılır.Mikrotüpün üst kısmında veya üstten dibe doğru çökelti oluşur. Örn: 1+, 2+ ,3 +, 4+

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>BL.TL.16</i>	<i>18.04.2013</i>	<i>01</i>	<i>27.06.2016</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel Ekol Hastanesi**  
**DİREKT COOMBS ÇALIŞMA TALİMATI**



Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Kontrol Eden
Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Emine ÖZÇELİK	Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Celalşah YAYICI	Hastane Müdürü Mustafa İŞKİNAL SÜ	Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNCİ
Son Kontrol		Onay	
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR		Başhekim Op.Dr. Sühan GAZİOĞLU	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.16	18.04.2013	01	27.06.2016	2 / 2