



Özel Ekol Hastanesi
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ
İNDİREKT COOMBS



1.AMAÇ : . Bu talimatı amacı eritrositlerin antijenlerine karşı dışardan bir etki ile antikor oluşup oluşmadığını saptamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat indirekt coombs tespiti istenilen hastaları kapsar

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar çalışanları sorumludur.

4.TALİMAT AKIŞI:

ÜRÜN: LISS / COOMBS (Hastalar için)

ORJİN: Human

PROFİL:Anti-IgG + C3d

KAT. NO: 50531.76.21

1.NUMUNENİN DAĞITILMASI

1.Kartın ilk üç mikrotüpüne Cell 1-2 -3 ' ten (kullanıma hazır test hücreleri) birer damla (50 uL) damlatılır.Üzerlerine 25 ul serum damlatılır.

2. ID-İNKÜBATÖRDE

15 dakika inkübe edilir

3. ID SANTRİFÜJ

10 dk. Santrifüj edilir.

4.DEĞERLENDİRME

Test negatif ise mikrotüpte (DAT) dipte sediment dipte birikir

Test pozitif ise kan örneği pozitiflik derecesine göre sınıflandırılır.Mikrotüpün üst kısmında veya üstten dibe doğru çökelti oluşur. Örn: 1+, 2+ ,3 +, 4+

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TH.PR.11	26.04.2018	01	11.11.2022	1 / 1