



**Özel Ekol Hastanesi**  
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ  
HORTUM KAPAMA CİHAZI



### 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Torba kan alındıktan sonra ,torbanın hortumu üzerinde boğum yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi.

### 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Tüm transfüzyon birim çalışanları.

### 3.TALİMATIN DETAYI:

Kapama işlemi yaklaşık 1 saniyede ve 3 mm genişliğinde bir izle yapılır. Hortumun çekilerek parçaların birbirinde ayrılması kolaydır. PVC hortumu elektrodların arasına yerleştirilir. Maşaya basılır Kapama işlemi otomatik olarak başlar ve maşa üzerinde sarımsık yanar. Işık sönünce hortum maşadan çıkarılır. Kapama işlemi tamamlanmış olur.

### 4.REFERANS DOKÜMANLAR:

Cihazın kullanım kılavuzu.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TH.PR.15	26.04.2018	01	11.11.2022	1 / 1