



Özel EKOL HASTANESİ
KÜVÖZ BAKIMI, TEMİZLİĞİ ve
DEZENFEKSİYONU TALİMATI



1. AMAÇ: Hastanemiz yenidoğan servisinde küvözden kaynaklanan hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması için küvözlerin temizlik ve dezenfeksiyon yöntemini belirlemek.

2. KAPSAM : Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi

3. SORUMLULAR : Yenidoğan Yoğun Bakım Çalışanları, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

4. UYGULAMA :

Küvözlerin Temizliği ve Dezenfeksiyonu:

- Küvözlerin temizliğinde tek kullanımlık bez kullanır ve tüm aşamalarda değiştirilir
- İşlem, yukarıdan aşağıya doğru deterjanlı nemli bez ile silme ve ayrı bir bezle durulama şeklinde yapılır.
- Temizlik günde 3 kez ve ayrıca görünür kirlenme olduğunda yapılır.
- Önce küvözün tüm ayrılabilir parçaları ayrılarak, Hidrojen Peroksit ve Perasetik Asit içerikli dezenfektan ile yıkanır, durulanır.
- En yoğun kontaminasyon bölgesi olan dış kapaklar, bu kapakları saran yastıkçık ve kollar gün içinde en az üç kez temizlenir ve içeriği ; Didesilmetilamonyum Klorit Klorheksid Glukonat Korazyon İnhibitaörü olan hızlı yüzey dezenfektanı (alkolsüz) ile dezenfekte edilir.
- Her bebek değişiminde, temizliğe ek olarak Hidrojen Peroksit ve Perasetik Asit içerikli dezenfektan ile dezenfeksiyon yapılır.
- Küvözlerin nemlendirici kapları, haftada bir ya da her bebek değişiminde steril edilir, steril su ile doldurulmalıdır. Kullanılmadığında bu kaplar dezenfekte edilerek kuru halde saklanmalıdır.
- Küvöz dezenfeksiyonu dışında fan ve filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma önerilerine göre yapılır.
- Yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri [YD.FR.13 KÜVÖZ TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON KONTROL FORMU](#) ile kayıt altına alınır.

Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Kontrol Eden
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ümran SÜREN	Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Cemşah YAYICI	Hastane Müdürü Mustafa İŞİK DİALSÜ	Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNÇİ
Son Kontrol		Onay	
Kalite Yönetim Direktörü Prof.Dr. Tuncay ÇAĞLAR		Başhekim Op.Dr. Cühan GASTİOĞLU	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.TL.20	31.05.2013	01	18.03.2016	1 / 1