



Özel Ekol Hastanesi
KARDİYAK CİHAZI ÇALIŞMA
TALİMATI



1.AMAÇ:

Kardiak cihazı uygun ve doğru bir şekilde çalıştırılması

2. KAPSAM:

Bu talimat cihazın uygun ve düzgün çalışmasını kapsar.

3.SORUMLULUKLAR:

Biokimya uzmanı, Laboratuar teknikeri

4.TALİMAT AKIŞI:

- Her kit kutusunun içinde o lota ait kalibrasyon bilgilerini içeren kart çıkar.
- Her lotu çalışmadan önce mutlaka ID kart okutun.
- Teste ait ekran sağda çıkar. OK tuşuna basın
- Numune kartuşsa pipetlenir.
- Kartuş cihaza konur.
- START'a basılır.
- İnkübasyon bittiğinde otomatik sonuç okunur.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.16	18.04.2013	05	11.11.2022	1 / 1