



Özel EKOL HASTANESİ
ENDOSKOPI - KOLONOSKOPI ÜNİTESİ
DENETİM FORMU



TARİH: .../.../20....

| Sıra | Kriterler | Evet | Hayır | Açıklamalar |
|--|---|------|-------|-------------|
| GENEL KURALLAR | | | | |
| 1 | Personel el hijyenine uyuyor mu? | | | |
| 2 | Likit sabun, kağıt havlu, alkol bazlı el antiseptiği mevcut mu? | | | |
| 3 | Koruyucu ekipmanlara ayrılmış bir yer var mı? | | | |
| 4 | Personel koruyucu ekipman kullanımına uyuyor mu? | | | |
| 5 | Kaçak testi yapılıyor mu? | | | |
| 6 | Endoskopi ve kolonoskopi cihazı için uygun saklama dolabı var mı? | | | |
| GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON | | | | |
| 7 | Aletler tüm yüzeyleri temas edecek şekilde 5 dakika enzimatik solüsyonda bekletiliyor mu? | | | |
| 8 | Endoskobun ana gövdesi, enzim çözücü solüsyona batırılmış temiz bir bezle siliniyor mu? Endoskobun ana gövdesi, enzim çözücü solüsyona batırılmış temiz bir bezle siliniyor mu? | | | |
| 9 | Tüm iç ve dış yüzeylerin dezenfektan solüsyon ile temas etmesi sağlanıyor mu? Bunun için lümenlerden dezenfektan geçirerek hava kabarcıkları kalmaması sağlanıyor mu? | | | |
| 10 | Yüksek düzey dezenfektan çözeltisi içine konulmadan endoskop parçalarının fazla suyu gideriliyor mu? | | | |
| 11 | Steril dokulara temas eden endoskopik aksesuarlar(biyopsi forsepsi,sitoloji fırçaları,skleroterapi iğneleri,endotrakeal problemleri) steril ediliyor mu? | | | |
| 12 | Sterilizasyon mümkün olmadığı durumlarda endoskop parçalarına en azından yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanıyor mu? | | | |
| 13 | Endoskopik cihazların dezenfeksiyon prosedürü biliniyor ve uygulanıyor mu? | | | |
| 14 | Yüksek düzey dezenfektan içine tamamen batırılarak önerilen sürede bekletiliyor mu? Bu sürenin takibi yapılıyor mu? | | | |
| 15 | Steril dokulara temas eden endoskopik aksesuarlar(biyopsi forsepsi,sitoloji fırçaları,skleroterapi iğneleri,endotrakeal problemleri) steril ediliyor mu? | | | |
| 16 | Endoskobun iç kanalları enzimatik çözelti ile jet akım sağlanarak yıkanıp, fırçalanıyor mu? | | | |
| 17 | Gastroskopi ve kolonoskopi için uygulanan dezenfeksiyon işlemi ayrı hazırlanmış dezenfeksiyon kabı ve çözeltisi ile mi yapılıyor? | | | |
| 18 | Hareket edebilen parçaları tüm pozisyonlara getirilip bol basınçlı su ile durulanıyor mu? | | | |
| 19 | Endoskop ve parçaları steril distile su ile iyice durulanıyor mu? | | | |
| 20 | Endoskop parçaları gün sonunda , takılmadan kurumayı kolaylaştırmak için dikey pozisyonda ve kontaminasyonu engeleyecek şartlarda saklanıyor mu? | | | |
| 21 | Hazırlanan solüsyon maksimum 7-14 günde bir değiştiriliyor mu? | | | |
| 22 | Endoskopik cihazların dezenfeksiyon prosedürü biliniyor ve uygulanıyor mu? | | | |
| 23 | Ünite temizliği, ünitenin temizlik talimatına göre yapılıyor mu? | | | |

Kontrol Eden:

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| EN.FR.11 | 01.04.2020 | 01 | 01.02.2025 | 1 / 1 |