



**Özel Ekol Hastanesi**  
**KUAGULASYON CİHAZI ÇALIŞMA**  
**TALİMATI**



**1.AMAÇ:**

BU TALİMATIN KOAGÜLASYON CİHAZININ KULLANIM FAALİYETLERİNİ TANIMLAMAKTIR.

**2. KAPSAM:**

BU TALİMAT CİHAZ KULLANIM FAALİYETLERİNİ KAPSAR

**3.SORUMLULUKLAR:**

BU TALİMATIN UYGULANMASINDAN LABORATUVAR TEKNİSYENİ SORUMLUDUR

**4.TALİMAT AKIŞI:**

**PT TESTİ ÇALIŞMASI**

Cihaza ilk olarak küvetleri yerleştirip bilyaları her bir küvete bir tane olacak şekilde bırakınız ve cihaza bağlı pipete 4 konumuna getirerek içine Neoplastine reaktifi çekiniz.

Test Mode'dan PT testini seçerek test ekranına geliniz.

Küvete 50 ul hasta plazması koyduktan sonra alt taraftaki inkübasyon tuşuna basınız .

50. saniyeden itibaren cihazın vereceği uyarı sesi ile küvetleri ölçüm bloğuna geçiriniz.

Ölçüm bloğunun altındaki pipet tuşuna bastıktan sonra 60. saniyeden itibaren pipet 4 konumundayken daha evvel pipete çekmiş olduğunuz Neoplastin reaktifinden 100 ul her bir küvete veriniz.Sonuçlar yazıcıdan çıkıncaya kadar bekleyiniz.

**APTT TESTİ ÇALIŞMASI**

Cihaza ilk olarak küvetleri yerleştirip bilyaları her bir küvete bir tane olacak şekilde bırakınız ve cihaza bağlı pipeti 2 konumuna getirerek içine 0.025 M CaCL<sub>2</sub> çekiniz.

Test Mode'dan APTT testini seçerek test ekranına geliniz.

Küvete 50 ul hasta plazması ve üzerine 50 ul CK Prest reaktifinden koyduktan sonra alt taraftaki inkübasyon tuşuna basınız.

170. saniyeden itibaren vereceği uyarı sesi ile küvetleri ölçüm bloğuna geçiriniz.

Ölçüm bloğunun altındaki pipet tuşuna bastıktan sonra 180. saniyeden itibaren pipet 2 konumundayken daha evvel pipete çekmiş olduğunuz CaCL<sub>2</sub> reaktifinden 50 ul her bir küvete veriniz. Sonuçlar yazıcıdan çıkıncaya kadar bekleyiniz.

**FIB TESTİ ÇALIŞMASI**

Cihaza ilk olarak küvetleri yerleştirip bilyaları her bir küvete bir tane olacak şekilde bırakınız ve cihaza bağlı pipeti 2 konumuna getirerek içine Fibrin Prest reaktifi çekiniz.

Test Mode'den Fibrinojen testini seçerek test ekranına geliniz.

Küvete 100 ul hasta plazması ( 1: 20 dilue edilmiş ) koyduktan sonra alt taraftaki inkübasyon tuşuna basınız.

50. saniyeden itibaren cihazın vereceği uyarı sesi ile küvetleri ölçüm bloğuna geçiriniz.

Ölçüm bloğunun altındaki pipet tuşuna bastıktan sonra 60. saniyeden itibaren pipet 2 konumundayken daha evvel pipete çekmiş olduğunuz Fibrin Prest reaktifinden 50 ul her bir küvete veriniz. Sonuçlar yazıcıdan çıkıncaya kadar bekleyiniz.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>BL.TL.17</i>	<i>18.04.2013</i>	<i>03</i>	<i>11.11.2022</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel Ekol Hastanesi**  
**KUAGULASYON CİHAZI ÇALIŞMA**  
**TALİMATI**



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<i>Kardelen ASMA</i> Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	<i>Yeşim İNCİ</i> Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	<i>Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR</i> Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.17	18.04.2013	03	11.11.2022	2 / 2