



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**SKOPİ CİHAZI KULLANIM ve**  
**RADYASYON GÜVENLİĞİ TALİMATI**



**1.AMAÇ:** Hastane Ameliyathane biriminde C kollu Scopi cihazının kullanımını, sorumlularını ve radyasyon güvenliği gerekliliklerini belirlemek.

**2.KAPSAM :** Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan C kollu Scopi cihazının kullanılmasını ve kullanım esnasında radyasyon güvenliği ilkelerini kapsar.

### 3.KISALTMALAR

### 4.TANIMLAR

### 5.SORUMLULAR

Radyoloji Uzman Hekim, Radyoloji Teknisyenleri, Hekimler, Ameliyathane personeli

### 6.SKOPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI:

- ✓ Cihazın kapalı olduğu kontrol edilir.
- ✓ Cihaz kapalı iken elektrik bağlantısı sağlanır. Cihaz açılır ve değerler kontrol edilerek çekime hazır hale getirilir.
- ✓ Skopi çekilecek uzuva uygun pozisyon verilir.
- ✓ Cihaz pedalında sağ taraf çekim yapar.
- ✓ Cihazın sol pedalı ise çekilen görüntüleri sol ekranda kayıt eder.
- ✓ Cihaz off konumuna getirilerek kapatılır.
- ✓ Cihazın üzerinde bulunan kırmızı kapatma kontrol tuşu; cihaz arızasında, kitlenmelerinde veya yaşanan farklı bir problem sonrası acil kapatma işlemini gerçekleştirmek içindir.
- ✓ Cihazın elektrik bağlantıları sökülerek, Cihaz yerine yerleştirilir.
- ✓ Cihazı sorumlu hekim ile beraber ameliyathane personeli kullanır.

### 7. SKOPİ CİHAZI KULLANIMINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ TALİMATI:

- ✓ Cihazın kullanıldığı süreçte çalışanları uyarmaya yönelik radyasyon tehlikesi simgesi bulunan lamba/ışık kaynağı aktif hale getirilir.
- ✓ Çekim esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılması gerekmektedir.
- ✓ Bu ekipmanlar SÇ.LS.01 *Kişisel Koruyucu Ekipman Listesinde* (bölüm bazlı) mevcut ameliyathane departmanı bölümünde belirlenmiştir.

### 7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

SÇ.LS.01 Kişisel Koruyucu Ekipman Listesinde (bölüm bazlı)

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>RG.TL.01</i>	<i>05.04.2016</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**SKOPİ CİHAZI KULLANIM ve**  
**RADYASYON GÜVENLİĞİ TALİMATI**



TC Sağlık Bakanlığı

Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Kontrol Eden
Radyoloji Uzmanı Uzm.Dr.Ömür ÖKTEN	Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Canşah FAZICI	Hastane Müdürü Mustafa İŞİK ALSÜ	Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNÇİ
Son Kontrol		Onay	
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay Çağlar		Başhekim Op.Dr. Sühan Gazioglu	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
RG.TL.01	05.04.2016	00	-	2 / 2