



Özel Ekol Hastanesi
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ
HORMON / SEROLOJİ CİHAZI



1.0 AMAÇ: Hormon/Seroloji cihazının uygun ve doğru bir şekilde çalıştırılması.

2.0 KAPSAM: Bu talimat Hormon/Seroloji cihazının uygun ve düzgün çalışmasını kapsar.

3.0 SORUMLUAR:

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar Teknisyeni

4.0 UYGULAMA:

RUTİN ÇALIŞMA

1.ÖRNEK GİRİŞİ

Ana menüden :

ORDERS seçeneğini seçilir

Kontrol,kalibrasyon ve hasta girişleri ayrı ayrı yapılır,Her bir örnek için : **PATIENT ORDER** seçeneğini seçilir

C: Rak , **P:** Pozisyon ve **SID:** Otomasyon numarası girişleri yapılır.

Testlerden o örnek ile yapılacak olanları aydınlatarak,seçilir

Çalışma acil ise rak karuselin 1 nolu bölmesine koyulur,

Dilüsyonlu çalışacaksa **ASSAY OPTIONS (F5)** seçeneğini seçilir

ADD (F6) seçeneğini seçilir

Bütün örnek girişleri tamamlanınca **EXIT (F1)** seçeneğini seçilir.

2. ÖRNEK SİPARİŞİNİN DÖKÜMÜ

Ana menü ekranında iken **Result** tuşuna basılır, sipariş dökümünü alınır.

3. ÖRNEKLERİN KONULMASI

Alınanörnekler ilgili yerlere , enaz yazılan miktar kadar koyulur.

Hava kabarcıklarını varsa patlatılır

Segmentler örnek karoseline yerleştirilir.

4. REAKTİFLERİN KONULMASI

Reaktiflerin kapakları açılır,her bir reaktife septum takılır

Reaktifler reaktif karoseline yerleştirilir.

5. INVENTORY KONTROLÜ

Buffer 'ları ,atık kapakları, ve RV'ler günlük olarak kontrol edilir.

6. ÇALIŞMAYI BAŞLATMAK

Cihaz **READY** konumunda iken **RUN** tuşu ile aktif hale getirilir.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>TH.PR.12</i>	<i>26.04.2018</i>	<i>01</i>	<i>11.11.2022</i>	<i>1 / 2</i>



Özel Ekol Hastanesi
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ
HORMON / SEROLOJİ CİHAZI

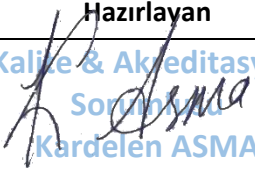

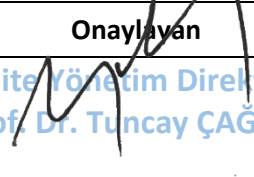


7. SONUÇLARIN İNCELENMESİ

STORED RESULT tuşuna basın.

VIEW STORED RESULTS tuşuna basın.

Sonuçlar incelenerek print edilebilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TH.PR.12	26.04.2018	01	11.11.2022	2 / 2