



Özel EKOL HASTANESİ
BASINÇLI BUHAR STERİLİZATÖR (OTOKLAV)
KULLANIMI VE BAKIMI TALİMATI



1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, otoklav ile sterilizasyon esnasında yapılacak işlem basamaklarının ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM:

Bu talimat, otoklavın kullanımını sırasında yapılacak işlemleri ve kontrol yöntemlerini kapsar .

3. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Sterilizasyon hemşiresi, otoklav görevli personeli sorumludur.

4. FAALİYET :

- 4.1.** Cihaz çalıştırılmadan önce su ve hava kontrol edilmelidir. Su veya hava yoksa cihaz çalıştırılmamalıdır.
- 4.2.** Cihazın açma anahtarı sağa çevrilerek cihaz çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 20-25 dakika cihazın ısınması beklenmelidir. Cihazın jeneratör, ceket ve hücre manometresi uygun dereceye gelince cihaz çalıştırılmalıdır.
- 4.3.** Cihazın yük haznesine 1 adet Bowie-Dick test paketi konulup kapağı kapatılmalıdır.
- 4.4.** Ekranda Bowie-Dick yazan tuşa dokunulup program bilgileri görüldükten sonra başlat butonuna basılmalı ve program başlatılmalıdır.
- 4.5.** Cihaz program bittiğinde sesli bir ikaz vermekte ayrıca ekranda yazı ile programın bittiği gözlenmektedir.
- 4.6.** Cihazın kapısı açılarak test paketi alınmalıdır. Bowie-Dick test paketi açılmalı, içindeki kağıdın renk dönüşümü kontrol edilmelidir. Renk dönüşümü uygun ise cihaz kullanılmalıdır. Sonuç olumsuz ise sorumluya haber verilmeli, cihaz kullanılmamalı, yetkililerin talimatına göre hareket edilmelidir.
- 4.7.** Bowie-Dick testi olumlu ise steril edilecek olan paket ve malzemeler otoklava yüklenmelidir.
- 4.8.** Yükleme yapılırken paketlerde kağıt kağıda, şeffaf kısım şeffaf kısma bakacak şekilde olmalı, set ve bohçalar arasında buhar geçişine izin verecek şekilde boşluk bırakılmalıdır.
- 4.9.** Cerrahi bohçalar daima dikey olarak dizilmeli ve cihaza çok fazla yükleme yapılmamalıdır. Otoklavın kapısı kapatılarak ekrandan yüklenen malzemeye uygun program seçilmeli ve başlat tuşuna basılmalıdır.
- 4.10.** Program bitince cihazın kapağı açılmalıdır. Steril malzemeler çıkarılmalı, ıslaklık ve nem kontrolü yapılmalıdır.
- 4.11.** Bowie-Dick testi ile otoklava yüklemesi yapılan set ve bohçaların kayıtları sterilizasyon kayıt defterine kayıt edilmelidir.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>DS.TL.03</i>	<i>04.07.2022</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



Özel EKOL HASTANESİ
BASINÇLI BUHAR STERİLİZATÖR (OTOKLAV)
KULLANIMI VE BAKIMI TALİMATI



5. CİHAZIN TEMİZLİĞİ

5.1. Cihaz Temizliğinde Kullanılan Malzemeler

- Ilık su
- Deterjan
- Yumuşak Bez
- Özel Temizleme Pedi
- Metal Parlaticı

5.2. Cihaz Temizliği

- 5.2.1.** Basınçlı buhar sterilizatör (otoklav) cihazlarının temizliği haftada bir kez yapılmalıdır.
- 5.2.2.** Cihaz akşam vardiyasında kapatılmalıdır.(cihaz kontrol anahtarı ve buhar vanası)
- 5.2.3.** Soğuyunca, kazanın tabanında bulunan sepet rayı ve süzgeçi çıkarılmalıdır.
- 5.2.4.** Kazanın iç çemberi, sepet rayı, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinmelidir.
- 5.2.5.** Gerekirse (leke görülürse) temizleme pedi ile ovulmalıdır.
- 5.2.6.** Kapı contalarına ıslak bez temas ettirilmemelidir.
- 5.2.7.** Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanmalıdır.
- 5.2.8.** Süzgeç ve sepet rayı yerine yerleştirilmelidir.
- 5.2.9.** Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenmelidir.
- 5.2.10.** Kontrol panelinin plastik bölümü ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenmelidir.
- 5.2.11.** Cihazın dış yüzeyi metal parlaticı ile parlatılmalıdır.
- 5.2.12.** Yapılan temizlik kayıt altına alınmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DS.TL.03	04.07.2022	00	-	2 / 2