



**Özel Ekol Hastanesi**  
**ENDOSKOP YIKAMA CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI**



**1.AMAÇ:** Bu talimatın amacı endoskop yıkama cihazının kullanım faaliyetlerini tanımlamaktır.

**2.KAPSAM:** Bu talimat endoskop cihazının çalıştırılmasını ve dezenfektan değişim işleminin nasıl yapılacağı faaliyetlerini kapsar.

**3.SORUMLULUKLAR:** Bu talimatın uygulanmasından endoskopi hemşiresi ve/veya endoskop kullanıcıları sorumludur

**4.TANIMLAR:** Bu talimat özel bir tanım içermemektedir.

**5.TALİMAT AKIŞI:**

**5.1. ENDOSKOP YIKAMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI**

- ✓ Makineyi aç
- ✓ Paneldeki tüm ışıkların yanmasını bekle
- ✓ Başlat düğmesine bas ve makinenin çalışmasını bekle
- ✓ Otomatik olarak makine çalışmıyorsa manüel yıkama yöntemine geçilir;
- ✓ Makineyi Kapat / Makineyi Aç
- ✓ Ayar Bölümünü otomatik durumdan manüel duruma getirilir.
- ✓ İki defa doldur düğmesine basılır ve iki kez duyulan sinyal sesinin ardından makine kapatılıp tekrar açılarak BAŞLAT tuşuna basılarak yıkama başlatılır.

**5.2.ENDOSKOP YIKAMA MAKİNESİNİN DEZENFEKTAN DEĞİŞİM İŞLEMİ**

- ✓ Makineyi aç ve Ayar bölümünü manüel duruma getir
- ✓ BOŞALT tuşuna uzun süreli bas ve makinenin durmasını bekle
- ✓ Kalan Dezenfektanı Aşağı kapaktan en soldaki musluktan hortum yardımıyla kovaya boşalt
- ✓ Makineyi kapat
- ✓ 15 litre Dezenfektanı makineye boşalt
- ✓ Makineyi aç ve Ayar bölümünü manüel duruma getir
- ✓ Dezenfektan DOLDUR tuşuna iki defa bas ardından Makinenin durmasını bekle
- ✓ İşlem bitmiştir Makineyi kapat.
- ✓ Her Dezenfektan değişim işleminde Deterjanı da değiştirebilirsiniz (Aşağı kapaktan deterjan yazan musluktan hortum yardımıyla kovaya boşalt ve makinenin içindeki deterjan bölümüne dezenfektan ile uyumlu Deterjanı yükleyin.)

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>MC.TL.03</i>	<i>01.11.2016</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel Ekol Hastanesi**  
**ENDOSKOP YIKAMA CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI**



T.C. Sağlık Bakanlığı

Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Kontrol Eden
Biyomedikal Caner İSTANMAKALI	Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Canşah TAÇICI	Hastane Müdürü Mustafa İŞKİNALSU	Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNCİ
Son Kontrol		Onay	
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay Çağlar		Başhekim Op.Dr. Sultan Gazioglu	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.TL.03	01.11.2016	00	-	2 / 2