



Özel Ekol Hastanesi
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ
PLAZMA TAV CİHAZI



1.AMAÇ VE KAPSAM:

-80 C de saklanan plazmaların 36,5 C de eritilerek kullanıma hazır hale getirilmesi.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Tüm transfüzyon birim çalışanları.

3.TALİMATIN DETAYI:

Cihaz açma kapama düğmesinden açılır. Suyu eksik ise distile su ile tamamlanır. Plazmalar su ile temas etmemesi için özel poşetlerine yerleştirilir. Cihazdaki yerlerine takılır, eritilme süresi ayarlandıktan sonra start tuşuna basılarak çalıştırılır. İşlem bittikten sonra plazma cihazdan çıkarılır, cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.

4.REFERANS DOKÜMANLAR:

Cihazın kullanım kılavuzu.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TH.PR.14	26.04.2018	01	11.11.2022	1 / 1