



**Özel Ekol Hastanesi**  
**VENTİLATÖR**  
**KULLANMA ve BAKIM TALİMATI**



**1.AMAÇ :** Bu talimat hastanemizdeki mevcut ventilatörlerin doğru kullanılabilmesini sağlamayı ve cihazın bakımının yapılmasını amaçlar.

**2.KAPSAM :** Yoğun bakım ve yeni doğan servisinde çalışan tüm doktor ve hemşireleri kapsar.

**3.SORUMLULUKLAR :** Bu talimatın uygulanmasından birimde çalışan hemşire ve doktorlar sorumludur.

**4.TANIMLAR :**

**5.TALİMAT :**

1. Hava, O2 hortumları ve elektrik güç kordonu irtibatlanır.
2. Hasta devresi ventilatöre ve nemlendiriciye irtibatlanır.
3. PO2 Blender kontrolü kullanarak O2 konsantrasyonu ayarlanır. (Sistemi kontrol etmek için test balonu takılır.)
4. CPAP, CMV, PTV, SIMV,ALC, ventilasyon modları seçilir.
5. Gerekli olan ventilasyon basıncı ayarlanır.(PIP,PEEP ayarları)
6. Gerek duyulan dalga şekli seçilir. Bu kontrol soluk alındığında kare veya sivri uçlu dalga şekli verecektir.
7. BPM (dakikada soluk sayısı ) kontrolü ile istenilen soluk alma hızı ayarlanır.
8. Hastaya göre inspiriyum zaman ayarı yapılır.
9. Alarm ayarları kontrol edilir. Ayarlama ve düzenleme işlemleri doğru olarak yapıldıktan sonra hasta devresinden test lastik balonu çıkarılır ve hasta ventilatör sistemine bağlanır.
- 10.Her hasta için ayrı set kullanılır. (Setler disposibledir.)
- 11.Hasta extübe edildikten sonra cihaz kapatılır,O2 kapatılır, cihazın temizliği yapılır, kullanıma hazır olarak bırakılır.

**5. CİHAZIN BAKIMI**

A. Günlük bakım

- 1.Fiziki temizliği yapılır
- 2.Çalışması ve bağlantıları kontrol edilir.

B: Aylık, yıllık Bakım

- 1.Yetkili firma tarafından yapılmaktadır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>YB.TL.03</i>	<i>25.04.2013</i>	<i>02</i>	<i>27.06.22</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel Ekol Hastanesi**  
**VENTİLATÖR**  
**KULLANMA ve BAKIM TALİMATI**



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<p>Kalite &amp; Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA</p>	<p>Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ</p>	<p>Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR</p>

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
YB.TL.03	25.04.2013	02	27.06.22	2 / 2