



Özel Ekol Hastanesi
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ
KAN ALMA ve ÇALKALAMA CİHAZI



1.AMAÇ VE KAPSAM:

Donasyon işlemi sırasında alınan kanı torba içindeki solüsyonla homojen bir şekilde karıştırarak istenilen miktarda kan alınmasını sağlar.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Tüm Transfüzyon birim çalışanları.

3.TALİMATIN DETAYI:

Cihaz açma kapama düğmesinden açılır. Torba cihazın üstündeki bölmeye yerleştirilir. Torbanın hortumu cihazın klempinden geçirilir ve donöre bağlanır. Start tuşuna basılarak cihaz çalıştırılarak kan alma işlemi başlatılır. Cihaz 450 ml ye ayarlı olduğundan torba dolduktan sonra cihaz uyarı verir ve klemp kapatarak kan alma işlemini sonlandırır.

4.REFERANS DOKÜMANLAR:

Cihazın kullanım kılavuzu.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TH.PR.13	26.04.2018	01	11.11.2022	1 / 1