



**Özel Ekol Hastanesi**  
**MSÜ DEKONTAMİNASYON BASAMAKLARI**




KİRLİ MALZEMELERİ AĞZI KAPALI KAPLARDA ÜNİTEYE TAŞI




DETERJANLI (ENZİMATİK SOLÜSYON) SU İLE ÖN YIKAMA YAP



DİSTİLE (DEİYONİZE) SU İLE EN AZ 3 KEZ DURULA

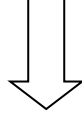

MALZEMELERİ İYİ BİR ŞEKİLDE KURULA

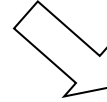

STERİLİZASYONA GİTMEYECEKSE

(YARI KRİTİK MALZEMELER)

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON İŞLEMİNE TABİ TUTULUR.

DEZENFEKTANLI SOLÜSYONDA UYGUN SÜRE BEKLET



DİSTİLE (DEİYONİZE) STERİL SU İLE EN AZ 3 KEZ DURULA



MALZEMELERİ STERİL ÖRTÜ İLE KURULA



AĞZI KAPALI KABİN İÇERİSİNE STERİL KOMPRES YERLEŞTİR



HAZIRLANAN MALZEMELERİ UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİR.



AYNI GÜN İÇİNDE KULLANIMA HAZIR OLMALIDIR.

MALZEME STERİL EDİLECEKSE

(KRİTİK MALZEMELER)



MSÜ'YE AĞZI KAPALI KAPLARDA GÖNDER

BURADA GEREKLİ OLAN VE STERİLİZASYON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
SH.YD.01	30.06.2016	00	-	1 / 2