



Özel EKOL HASTANESİ
KUVÖZ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
TALİMATI



1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, hastanemizde kullanılan yenidoğan kuvözlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunun etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini ve standart uygulamaların belirlenmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM:

Bu talimat kuvözlerin temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli temizlik personeli, kontrolünden Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi sorumludur.

4. TANIMLAR:

4.1. Kuvöz: Prematüre olarak ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin hayati fonksiyonlarını yardım almaksızın devam ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olan, bebeklerin anne karnında alıştıkları sıcaklığı, nem ortamını, anti bakteriyel filtreden geçirilmiş, temiz ve gerekli havayı sağlayan, bebeğin izlenmesi ve bakımına olanak verecek şekilde, ses izolasyonuna sahip, şeffaf, steril ve elektronik donanıma sahip özel bebek yatağıdır.

5. FAALİYET:

5.1. Temel İlkeler

5.1.1. Temizlik işlemi günde bir kez ve gerektiğinde gerçekleştirilmelidir.

5.1.2. Kuvözlerin temizliğinde tek kullanımlık bez kullanılmalıdır ve bezler her aşamada değiştirilmelidir.

5.1.3. Temizlik işlemi yukarıdan aşağıya doğru, deterjanlı nemli bez ile silme ve ayrı bir bezle kurulama şeklinde gerçekleştirilmelidir.

5.1.4. En yoğun kontaminasyon bölgesi olan dış kapaklar, bu kapakları saran yastıkçık ve kollar gün içinde en az 2 kez temizlenmeli ve “**YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM DEZENFEKTAN KULLANIM PLANI**”nda belirtilen alkolsüz hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

5.1.5. Dolu bir kuvöz boşaldıktan sonra dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmeden kuvöz tekrar kullanılmamalıdır.

5.1.6. 72 saatten uzun süreli kuvöz kullanımlarında her 72 saatte bir bebekler ayrı bir yere alınarak kuvöze dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

5.1.7. Kuvözlerin nemlendirici kaplarında steril distile su kullanılmalıdır ve 72 saatte bir ya da her bebek değişiminde steril edilmelidir.

5.1.8. Kuvöz dezenfeksiyon işlemi dışında oksijen ve hava filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma önerilerine göre yapılmalıdır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>DS.TL.02</i>	<i>21.10.2021</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



Özel EKOL HASTANESİ
KUVÖZ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
TALİMATI



5.2. Kuvözlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu

- 5.2.1. Kuvözün tüm ayrılabilir parçaları birbirinden ayrılır.
- 5.2.2. Deterjanlı nemli bez kullanılarak kuvözün tüm parçaları tek tek silinir.
- 5.2.3. Silme işlemi tamamlanan parçalar durulanır ve ayrı bir kuru bez kullanılarak kurulur.
- 5.2.4. Kurulama işlemi sonrası ön temizliği ve dekontaminasyonu gerçekleştirilmiş parçaların dezenfeksiyon işlemi “**YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM DEZENFEKTAN KULLANIM PLANI**”nda belirtilen hidrojen peroksit ve perasetik asit içerikli solüsyon kullanılarak yapılır.
- 5.2.5. Dezenfektanın etki süresi kadar beklenir ve parçalara durulanarak, temiz kuru bez ile kurulur.
- 5.2.6. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi “**KUVÖZ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON KONTROL FORMU**”na kaydedilir.
- 5.2.7. İşlem bitiminde malzemeler toplanır. Atıklar “**ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**”ne uygun olarak ortamdaki uzaklaştırılır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Ahmet Can KÜÇÜKKURT	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DS.TL.02	21.10.2021	00	-	2 / 2