



Özel EKOL HASTANESİ

KUVÖZ TEMİZLİK TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; hastanede bulunan kuvözlerin temizliğini standartlaştırmaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, kuvöz temizliğindeki işlem basamaklarını, birimde görevli hemşireler ve yardımcı sağlık personellerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Başhekim, Tedavi ve Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, yardımcı sağlık personelleri sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Kuvözler günlük olarak deterjanlı su ile yeşil bezle temizlenmeli, durulanmalı ve nemli kalmayacak şekilde kurulanmalıdır.

4.2. Haftalık olarak bebek, kuvöz dışına alındıktan sonra genel kuvöz temizliği yapılmalıdır. **Temizlik Maddeleri Ve Dezenfektan Kullanımı Talimatı** na uygun olarak dezenfektan kullanılmalıdır.

4.3. Kuvözde enfekte bir bebek yatışı oldu ise bebek kuvözden çıktıktan sonra başka bebek alınmadan dezenfektan ile temizlenmelidir.

4.4. Kuvözün şilte ve yatak bölümü çıkartılmalıdır. Dezenfektan ile yeşil bezle silinerek dezenfekte edilmelidir ve nemli kalmayacak şekilde kurulanmalıdır.

4.5. Kuvözün ayrılabilen tüm parçaları çıkartılmalı ve dezenfekte edilmeli, nemli kalmayacak şekilde kurulanmalıdır.

4.6. Genel temizliği yapılan kuvözün yardımcı sağlık personeli tarafından tüm parçaları takılmalı ve hemşire tarafından kuvöz kontrol edilerek tüm parçalarının eksiksiz olması sağlanmalıdır.

4.7. Nemlendiricilere distile su konulmalı ve 24-48 saatte bir değiştirilmelidir.

4.8. Oksijen monometreleri 24-48 saatte bir değiştirilmelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
YD.TL.14	04.07.2022	00	-	1 / 1