



Özel Ekol Hastanesi
HEMOGRAM CİHAZI ÇALIŞMA
TALİMATI



1.0 AMAÇ:

Hemogram cihazı uygun ve doğru bir şekilde çalıştırılması

2.0 KAPSAM:

Bu talimat CELLDYNE RUBY hemogram cihazlarının uygun ve düzgün çalışmasını kapsar.

3.0 SORUMLUAR:

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar Teknisyeni

4.0 UYGULAMA:

4.1. OTOMATİK ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ: - CELL DYNE RUBY

Tüpler racklara konulur ve racklar uygun şekilde Rack yerleştirme havuzuna konur. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar.

Sonuçlar Bilgisayar ekranında menüden kontrol edilir.

4.2. MANUEL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ :- CELL DYNE RUBY

Mode değiştirme tuşuna basılır. Tüp tutucu kısım otomatik açılır. Bilgisayar ekranında SOL alt köşedeki SPECİMEN ID kısmına örnek no yazılır ,açılan proba tüp yerleştirilir arka kısmındaki pedal a basılır ve cihaz kanı çeker uyarı sesi ile tüp çıkartılır.Sonuçlar otomasyona aktarılır.Cihazın menüsünden de sonuçlar kontrol edilir

4.3. KAPATMA PROSEDÜRÜ: CELL DYNE RUBY

Bilgisayar menüden SHUTDOWN seçilir. Boş bir hemogram tüpe ENZYMATİC CLEANER solüsyonu konur ve açılan tüp tutucu kısmına yerleştirilir. START tuşuna basılır.

Cihaz yıkama işlemi bitince kendini kapatır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<p>Kalite Direktörü Sude BAKIR</p>	<p>Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Yesim İNCİ</p>	<p>Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR</p>

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.13	14.06.2013	05	01.12.2023	1 / 1