



**Özel Ekol Hastanesi**  
**HORMON CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI**



**1.0 AMAÇ:** Tümör marker ve hormon testlerinin doğru çalışmasını sağlamak.

**2.0 KAPSAM:** Bu talimat Hormon cihazının uygun ve düzgün çalışmasını kapsar.

**3.0 SORUMLUAR:**

Biyokimya Uzmanı

Laboratuar Teknisyeni

**4.0 UYGULAMA:**

4.1. ARCHITECT PLUS İ2000SR Cihazı Çalıştırılması

4.1.1.Order menüsünden hasta,kontrol ve kalibrasyon girişleri yapılır

4.1.2.Maintenance menüsünden *daily maintanace* seçilerek günlük yıkama yapılır.

4.1.3.Azalan Reaktifler miadları kontrol edilerek cihaza yüklenir.

4.1.4.QC( Kontrol) menüsünden kontroller seçilir.

4.1.5.Kontrol serumları raklara ekranda gösterildiği şekilde yerleştirilir.

4.1.6.Solüsyon bidonları ekranda görüldüğü şekilde doldurulur.

4.1.7.Çalışmayı başlatın.

4.1.8. Çalışma tamamlandığında, test sonuçları otomasyon sistemine aktarılır, işi biten reaktifler ve numuneler çıkarılır.

4.1.9. Test çalışması bitince cihaz READY konumuna getirilir

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.14	18.04.2013	04	11.11.2022	1 / 1