



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM**  
**VENTİLATÖR TEMİZLİĞİ ve BAKIMI**



**AMAÇ :** Yenidoğan YBÜ sinde kullanılan vantilatörlerin uygun kullanımını ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

**KAPSAM :** Sorumlu hemşire, servis hemşireleri, hasta bakıcıyı kapsar.

### UYGULAMA

1. Ventilator devreleri sık değil, kirlendiğinde değiştirilmelidir.
2. Ventilator devresi tek kullanımlık olmalıdır. Ancak çok özel durumlarda tekrar kullanılabilir.
  - a. Çıkarılan kirli devrelerin mekanik temizliği yapılır, suyun altında ayrılabilen ekler ayrılır, fırçalanır ve sonra etilen oksite gönderilir veya hazırlanan yüksek düzey alet dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
3. Nemlendirici kaplar her gün yıkanmalı ve sıvıları değiştirilmelidir. Tekrar kullanılabilir özellikte ise yeni bir hasta için bir önceki hastadan kalan nemlendirici kabı kesinlikle kullanılmamalı, her yeni hasta için temizlenip dezenfekte edilmiş ve kurutulmuş yeni bir nemlendirici kabı kullanılmalıdır.
4. Nemlendiricinin 24saatte bir boşaltılıp steril distile su ile doldurulmasına dikkat edilmelidir.
5. Ventilatorün dış yüzeyleri, su ve deterjanla temizlenir ve 1/100 çamaşır suyu ile, (ekran,panel gibi hassas yüzeyler tercihen %70'lik alkol ile) dezenfekte edilir.

<b>Hazırlayan</b> Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ümran SÜREN	<b>Hazırlayan</b> Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Canşah TAŞICI	<b>Kontrol Eden</b> Hastane Müdürü Mustafa İŞİK M. ALSÜ	<b>Kontrol Eden</b> Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNÇİ
<b>Son Kontrol</b>		<b>Onay</b>	
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR		Başhekim Op.Dr. Cühan GAZİOĞLU	

<b>Doküman No</b> EN.TL.21	<b>Yayın Tarihi</b> 31.05.2013	<b>Revizyon No</b> 01	<b>Revizyon Tarihi</b> 18.03.2016	<b>Sayfa No</b> 1 / 1
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------